

HI Community Maske

Community Maske HI ist die nachhaltige und schöne Lösung für die Abdeckung von Mund und Nase und eine stimmige Alternative zu Einwegmasken. Eine technische Neuentwicklung im typischen Koziol-Design und höchster Funktionalität.

Das Besondere ist die Möglichkeit, das Filtervlies auszutauschen und die Maske selbst vielfach zu benutzen. Sie ist einfach von Hand oder in der Spülmaschine zu reinigen und vor allem auch schnell wieder zu trocknen.

Mit dem Tragen dieser Maske zeigt man persönliche Verantwortung für sich und seine Umwelt. Sie reduziert den Ausstoß von Partikeln aus der Atemluft des Trägers an die Umgebung und reduziert somit die Ansteckungsgefahr für andere.

Gleichzeitig schützt sie den Träger vor unbedachten Berührungen der Lippen, der Nase und des Gesichts und damit vor der Selbstinfizierung durch die Hände.

Hinweis: HI ist keine Atemmaske nach FFP-Standard. Sie bietet keinen garantierten Schutz vor Viren. Regelmäßig Hände waschen und ausreichend Abstand halten sind immer noch der beste Schutz!


HI Community Maske
Design: koziol werksdesign

Anwendung

Die Maske ist dreiteilig aufgebaut. Zwischen Maskenkörper und Innenteil wird ein Schutzvlies eingelegt, das man nach Bedarf jederzeit auswechseln kann.

Das Filterelement in die Innenseite des Maskenkörpers einlegen und damit die Löcher abdecken. Es kann jedes atmungsaktive Material, z.B. Vlies, Stoff oder Papier verwendet werden.

Danach die Gittermaske von innen gegen das Pad aufsetzen und das Gummiband durch die beiden seitlichen Laschen ziehen.

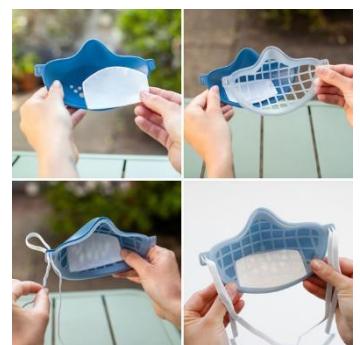

Durch das doppelte Gummiband kann die Maske sehr gut individuell an die jeweilige Gesichtsform angepasst werden.

Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert werden und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an der Seite zu minimieren. Dazu die Bänder entsprechend festziehen und hinter dem Kopf zusammenknoten.



Das Material ist extrem flexibel und anschmiegsam und sorgt für maximalen Tragekomfort.



Die Maske ist perfekt mit Seife zu reinigen, ebenso kann sie in der Spülmaschine bei mindestens 60°C gespült werden. Bitte vor der Reinigung das Gummiband entfernen und die Elemente spannungslos einlegen und keinesfalls einklemmen.

Die Maske kann inkl. der Bänder in der Waschmaschine gewaschen werden. Die Wassertemperatur sollte mindestens 60 °C und maximal 70°C betragen. Bitte nicht schleudern.

